



毎日の生活に
水素水のある暮らしを。

NEW
デザイン



省エネ・安心・使いやすさ
機能をプラス



節電

自動消灯(オートOFF[※])機能を追加。
使用后表示ランプを自動消灯します。

※電源をOFFにする機能ではありません。

連続式電解水生成器
f Feliz Power
フェリス・パワー

管理医療機器 連続式電解水生成器 / 医療機器認証番号: 20800BZZ00226A08

フェリスパワーの「水素水」は水素(H₂)を多く含んだアルカリ性の「水素水」です。




胃腸症状の改善に有効です。

フェリスパワーは、水道水を電気分解して「水素水」を生成する管理医療機器です。

フェリスパワーの水素水は、胃腸症状の改善に有効です。胃もたれ・胃の不快感をやわらげ、胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。



フェリスパワーは、電気分解で陰極(マイナス極)側に抗酸化力(還元作用)を持つ水素を発生させ、カルシウムやマグネシウムなどの有用なミネラル成分も溶け込んでいるアルカリ性の水素水を生成する医療機器です。

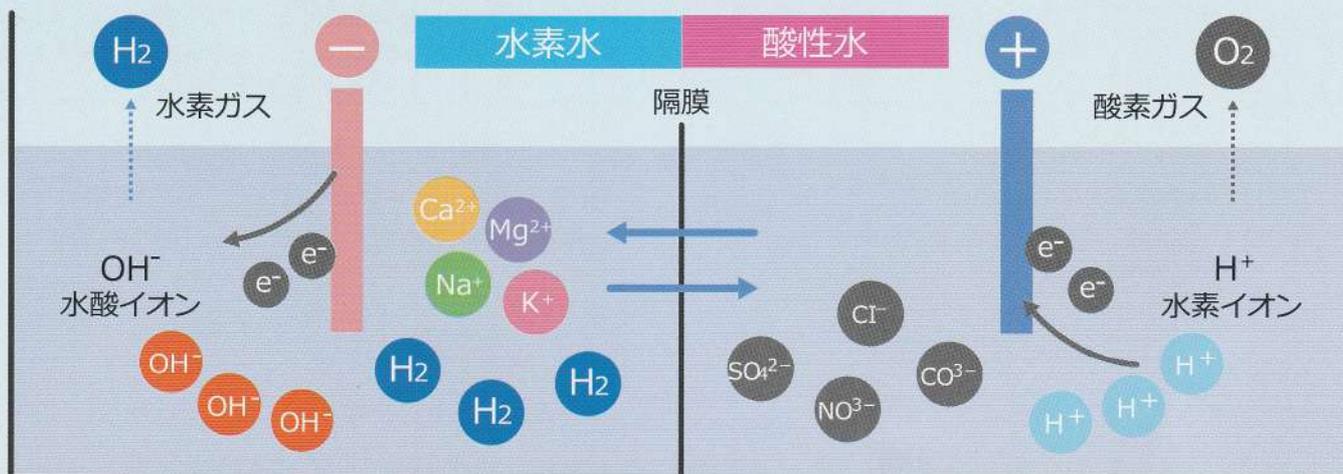

水分子から水素と水酸イオンが発生しアルカリ性になり、カルシウムイオンなどが引きつけられてミネラル分が高まります。

プラス極側では、水分子から電子が放出されて酸素が発生、水素イオン濃度が高くなり、酸性になります。



フェリスパワーの水素濃度(1202μg/L)^{*1}



フェリスパワーのORP値(-761mV)^{*1}


※1：水素濃度、ORP値は、地域・水質・水圧・水温によって変化します。当社にて、埼玉県川口市水道水で生成直後に測定した値。数値を保証するものではありません。

水素水の証し

電気分解で発生する白い微細な気泡が水素です。
発生した水素は水に溶け込みます。
単位はマイクログラムパーリットル(μg/L)。
水素には還元力(抗酸化力)があり、酸化を抑えます。

還元力の指標「ORP」

ORPは酸化還元電位のことで「ものを酸化させる、または還元する電気的エネルギー」のレベルのこと。
単位はミリボルト(mV)。
水のORP値がマイナス(-)なら還元力(抗酸化力)があるということを示します。

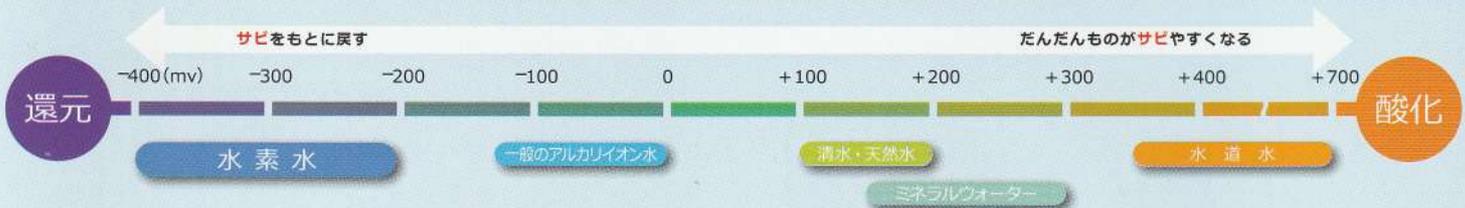

フェリスパワーは、できたての水素水を コストを気にせず、家族みんながいつでも使えます。

市販の水素ガスを溶け込ませた水や、美味しくて便利なウォーターサーバー、ミネラルウォーターなどでは、コストが掛り過ぎて飲用以外にはなかなか使えません。



おすすめ

普段「水素水」を購入している方

- いつでも水素水を楽しみたい
- お料理等にも水素水を活用したい

おうちでいつでも水素水が楽しめるフェリスパワーなら、収納場所や消費期限に悩む心配もありません。



おすすめ

運動をよくされている方

- 普段からよく運動している
- 普段の水分補給にこだわりたい

運動時の水分補給に水素水を取り入れることで、さらなる健康効果が期待できます。



おすすめ

お得に水素水を楽しみたい方

- 水素水を手軽に取り入れたい
- コストパフォーマンスが気になる

おうちで水素水を作れば大きなコストダウンに。毎日お得に水素水を楽しみたい方にこそ、フェリスパワーはお勧めです。



※本カタログで使用している「水素水」または「電解水素水」及び「酸性水」は、JIS T 2004:2005で示される「アルカリ性電解水」及び「酸性電解水」です。



水素水

- ・飲用
- ・調理に

水素をはじめミネラルを多く含むので料理のおいしさを引き立てます。



●飲用として・・・

まろやかで口当たりがよくミネラルを多く含みます。胃腸の調子を整える効果があります。



●煮物に・・・

浸透性が高いので煮物の素材に味をしっかりとしみこませます。



●ご飯の炊き水に・・・

水素水で炊いたご飯は酸化しにくいので、変色せずふっくらおいしく炊けます。



●コーヒー、紅茶に・・・

少ない分量でマイルドな味わいに。



●お茶に・・・

色鮮やかで渋みを和らげます。




●水割りに・・・

マイルドな味になります。



●ダシ取りに・・・

旨味を素材の中から早く抽出します。

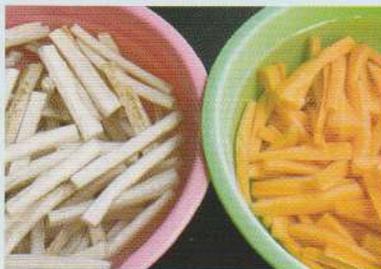

●アク抜きに・・・

ゴボウ・タマネギ・タケノコ・ナスなどのアク抜き。



●果物の酸化防止に・・・

酸化による果物の変色を防ぎます。

1台で3種類の水を生成します。

浄水

- ・粉ミルク
- ・薬の服用に

汚れやおいを強力に除去するので安心で安全です。

浄水カートリッジで残留塩素やトリハロメタンなどを除去したクリーンで美味しいお水です。粉ミルクや薬の服用にお使いいただけます。



酸性水

- ・洗顔
- ・洗い物に

(飲用ではありません)

洗顔や洗い物に無駄なく使えます。

酸性水は電気分解でプラス極側にできる弱酸性の水です。洗顔や食器や布巾などの洗い物にお使いいただけます。



安心の信頼と実績

カンゲンの全国ネットワーク

浄水器や水素関連商品や健康機器など、皆さまの健康のサポートを続けて36年

最寄りの当社サービスセンター
または提携保守会社から、
迅速丁寧に対応いたします。

【提携先】


株式会社クラシアン

株式会社クリーンサポート



取り付けできない水栓もおまかせください！

下記のような水栓をお使いの場合、そのままでは付属の分岐水栓を取り付けることができません。

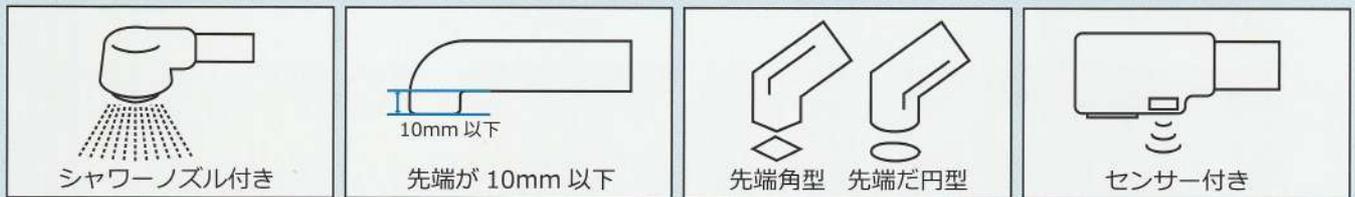

取り付けできない水栓には、分岐(別水栓)工事がおすすりめです。



●当社におまかせください！

付属の切り替えコックが、蛇口の先端に取り付けられない場合、現在ご使用中の水栓から分岐させた別水栓を設置します。

●お得な工事料金！

一般的な水道業者の半額程度で工事を行います。



【付属品】

- 水栓蛇口用分岐水栓
- 分岐水栓用アタッチメント
- 入出水ホース
- 排水ホース
- グリセロリン酸カルシウム
- 副吐水セット
- pH測定キット

※付属品の仕様は予告なく変更する場合があります。



f Feliz Power

連続式電解水生成器
フェリス・パワー

管理医療機器 連続式電解水生成器 / 医療機器承認番号: 20800BZZ00226A08

本体価格 (税込)

290,400円

●標準工事費 …… 16,500円(税込)

●浄水カートリッジ …… 15,400円(税込) (流量15tで交換)


特長

- ① **15t処理の浄水カートリッジ**
1日40ℓご使用で約1年間(15t)ご使用になれます。浄水カートリッジ交換時期は、14tでカートリッジランプの点滅、15tでランプが点灯してお知らせします。
- ② **高性能電解槽**
電極板にはチタン電極白金メッキを採用。電解効率を高め、安定した電解水が得られます。
- ③ **全自動洗浄機能**
マイコン制御のオートクリーニング方式。毎使用後時間に応じて洗浄します。電極板のスケール付着による電解能力の低下を防ぎます。

- ④ **メロディーON/OFFスイッチ**
電解酸性水生成中はメロディーが鳴ります。気になる場合は消すことも可能です。
- ⑤ **使いやすいコンパクト設計**
蛇口から取水する2ウェイ方式で設置場所を選ばず、壁掛けも可能。

操作パネル

- ① **洗浄表示ランプ**
電解槽の洗浄時に点灯表示します。終了後には消灯します。
- ② **水素水/酸性水表示ランプ**
水素水、酸性水の設定に合わせて点灯します。
- ③ **流量表示ランプ**
通水量を表示します。
- ④ **電解レンジ表示ランプ**
設定した電解レンジを表示します。
- ⑤ **メロディーランプ**
点灯時、酸性水を使用するとメロディーが流れます。
- ⑥ **休止ランプ**
安全装置が働いた時に点灯します。
- ⑦ **切り替えボタン**
蛇口から出る水を水素水あるいは酸性水に切り替えることができます。
- ⑧ **電解レンジ設定ボタン**
●電解の強度を選択できます。
●浄水も選択できます。

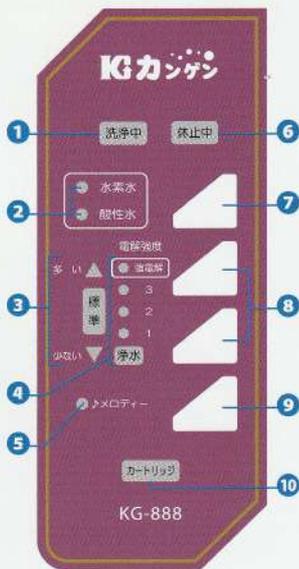

- ⑨ **メロディーON/OFFボタン**
電解酸性水使用時に「メロディーを流す」または「流さない」を切り替えるボタンです。
- ⑩ **カートリッジ交換警告ランプ**
浄水カートリッジの交換準備時期に点滅し、交換時期に点灯します。

使用上のご注意

- 水道水の水質基準に不適合な原水は処理できません。使用しないでください。
- 硬水を軟水に変えることはできません。 ●地域によって塩素除去能力の寿命に多少の差があります。
- お買い上げ前に取付できる水栓が形状をご確認ください。水栓の形状により取付できない場合があります。
- 水質(地下水)によっては十分なpH値が得られない場合があります。 ●本器は日本国内でご使用ください。

仕様

給水仕様	吐水蛇口分岐式(Uターン方式)	
給水接続	分岐水栓セット(オプション有)	
電源電圧	AC100V	
定格電流	2.5A	
本体寸法	幅240×高さ295×奥行110mm	
	重量 約5kg	
構成	据置き・壁掛け兼用・浄水器内蔵	
操作方法	押ボタンスイッチ(電解強度・水素水/酸性水切換え・メロディー)	
最高使用水温	約40度(熱水防止機構付)	
使用水道圧範囲	0.07~0.59Mpa(0.7~6.0kgf/cm ²)	
電解方式	連続式電解方式(流量センサー内蔵)	
電解	処理水量	浄水能力/最大約6ℓ/min 水素水:酸性水(7:3)
	電解能力切換え	5段階(浄水・1・2・3・強電解)
	電解槽	チタン電極白金メッキ
	電解洗浄	オートクリーニング方式 (マイコン制御による全自動洗浄方式/使用通水量に応じて洗浄)
分岐水栓	シャワー付 標準使用状態を1日40ℓとして約1年間 (原水残留塩素濃度2ppmに対し0.4ppmに達するまでの水量)	
浄水器(カートリッジ)	処理水量	JIS S 3201に基づく評価試験により 残留塩素(総ろ過水量15,000ℓ 除去率80%) 総トリハロメタン(総ろ過水量4,800ℓ 除去率80%) 2-MIB(カビ臭)(総ろ過水量2,200ℓ 除去率80%)
	寿命表示	流量積算により、14tで交換時期予告LED点滅、15tでLED点灯
	ろ過材料	銀添加活性炭(残留塩素・カルキ臭・有機化合物・臭い除去)、 亜硫酸カルシウム、繊維状活性炭、鉛除去対応イオン交換繊維、 ゼオライト
交換方式	ワンタッチ交換システム	
カルシウム添加	強制溶解型添加方式 添加筒内蔵	
電源保護装置	ガラス管ヒューズ	

※商品の仕様は予告なしに変更することがあります。

安全に関するご注意

- 腎疾患(腎不全やカルウム排泄障害)の方は、水素水を飲用しないでください。
- pH10以上の水を直接飲まないでください。(飲用にはpH9.5前後をおすすめします。1日あたりの飲用量は、0.5ℓから1ℓを目安にしてください。)
- 次の方は水素水を飲用する前に、医師に相談してください。
●医師の治療を受けている方 ●持病のある方、または身体の弱っている方
●腎臓に疾患のある方
- 水素水を飲用するときには、次のことにご注意ください。
●医薬品を水素水で服用しないでください。
●飲用して身体に異常を感じたとき、または飲用し続けても症状に改善がみられない場合には、医師に相談してください。
●下痢や発疹などの症状が出た場合飲用を中止し、医師に相談してください
- 次の方は酸性水を使用する前に、医師に相談してください。
●肌の弱い方 ●アレルギー体質の方
- 初めて使用される方は、pHが中性に近い水を少量ずつ飲用し、その後体調に合わせてpH・量を調節してください。
- 安全のため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。

総発売元

日本水素水振興協会会員 / 日本電解水協会会員

KG 株式会社 カンゲン

〒332-0016 埼玉県川口市幸町2-8-2 フリーダイヤル:0120-987-007

●お問い合わせは当店へ